

ТИНТВИН

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

МОДЕЛЬ Р 4
Детский компрессорный небулайзер (ингалятор)



Гарантия 5 лет



КОМПРЕССОРНЫЙ ИНГАЛЯТОР
Модель Р4
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
компрессорный небулайзер (тинтавлин)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 9- МУНДУШКА-СОСКА
- 10- РЕСПИРАТОРНАЯ МАСКА
- 11- ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ НЕБУЛАЙЗЕРА
- 12- НИЖНЯЯ ЧАСТЬ НЕБУЛАЙЗЕРА
- 13- НЕБУЛАЙЗЕРНАЯ КАМЕРА
- 14- ШИСТЫ А-В-С
- 15- ФИЛЬТР (5 ШТ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Внимательно прочтите предупреждения, содержащиеся в данной инструкции и хранить её для последующих консультаций.

- Хранить прибор вдали от детей и людей, не умеющих с ним обращаться.
- Хранить вдали от детей компоненты упаковки (картонная коробка, пластиковые пакеты и т.д.)
- Не использовать 100% эфирные масла.
- Использовать прибор для аэрозольных ингаляций с лекарственными средствами только по предписанию врача.
- Не использовать соединения и аксессуары, не предусмотренные производителем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не использовать прибор при наличии воспламеняемых смесей, таких как кислородные и т.д.
- Не использовать прибор, если после снятия упаковки имеются повреждения, которые могли быть спровоцированы при транспортировке. Обратиться в Центр Технического Обслуживания при любых сомнениях.
- Не использовать прибор при повреждении кабеля.
- Хранить прибор и кабель вдали от источников тепла.
- Не засорять воздухопроводящий прибор.
- Рекомендуется персональное использование аксессуаров.
- После процедуры не оставлять остатки лекарственных средств в небулайзере.
- Чистить, а также производить операции по очистке или техническому обслуживанию только после извлечения питающего кабеля из розетки.
- Не погружать прибор в воду или другую жидкость и не использовать его при мытье или душе.
- Хранить прибор в сухом, защищенном от влаги месте
- При загрязнении фильтра необходимо заменить его на новый.
- В случае случайного падения прибора в воду необходимо извлечь кабель из розетки. Извлечь прибор из воды и в дальнейшем не использовать его.
- Не использовать прибор мокрыми руками.
- Убедитесь, что прибор расположен на устойчивой и прочной поверхности для предотвращения падений и переворачиваний.
- Не использовать прибор во время сна.
- Не засорять решетки охлаждения.
- В случае неисправности или плохой работы прибора необходимо извлечь вилку из розетки. Ремонт производится только в уполномоченных Центрах Технического Обслуживания.
- После проведения процедуры необходимо утилизировать все части прибора, представляющие опасность, особенно для детей, которые могут использовать их для игры.
- Установка должна производиться согласно инструкциям производителя. Ошибочная установка может причинить вред людям, животным или предметам, по отношению к которым производитель не может быть признан ответственным.
- В случае не использования, прибор должен быть отключен от сети.

ВНИМАНИЕ!

- Рекомендуется иметь альтернативный прибор или лекарственное средство (по предписанию врача) при невозможности завершения терапии в случае отсутствия электрической энергии или неисправности.
- Терапия всегда предписывается врачом, который назначает тип лекарственного средства, дозировку и график проведения процедур.
- Прибор предусмотрен для максимальной работы постоянной работы 30 минут. После данного периода постоянной работы прибор должен быть отключен на 30 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ НЕБУЛАЙЗЕРА	> 7 мл
РЕЖИМ РАБОТЫ	> 30 мин работы – 30 мин паузы
ВЕС ПРИБОРА	> 1.500 гр.
РАЗМЕРЫ ПРИБОРА	> 180 x 125 x 188 мм
НАПРЯЖЕНИЕ ПРИБОРА	> 220 V ~
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК	> 0,7 А
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	> 2 бар (200 Кпа)
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТОК	> 8 л/мин
ПРЕДОКАЗАТЕЛЬ	> 1,6 А/С
СКОРОСТЬ РАСТЫВАНИЯ	> 0,25 мг/мин
РАЗМЕРЫ ЧАСТЕЙ	> шпатель «А» – размер частиц до 90% составляет 5 – 10 мкм > шпатель «В» – размер частиц до 90% составляет 3 – 5 мкм > шпатель «С» – размер частиц до 90% составляет 1 – 3 мкм
МОЩНОСТЬ	> 160 Вт
ЧАСТОТА	> 50 Гц
УРОВЕНЬ ШУМА	> 50 см приблизительно 54 дБ
ИГО	> Приборы типа В > Прибор не контактирует с инъекционными жидкостями > Иглоуколатель Обработается в ультразвуковой дезинфекционной ванне
ВКЛ	> Переменный ток
ВЫКЛ	> Включен
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	> Мин: -20 °С Макс: +50 °С
УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ	> Макс: RH 94%

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Допустимы изменения количества оборотов двигателя, при этом средние характеристики прибора являются неизменными.
- Производитель, сервис и Центр сервисного обслуживания несут ответственность за безопасность изделия только в случае, если:
- Сборка, установка и ремонт были выполнены уполномоченным персоналом.
- Электрическая сеть соответствует действующим нормативам.
- Были выполнены все инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Производитель освобождается от ответственности в случае ущерба при несоблюдении, ошибочном или иррациональном использовании прибора и его аксессуаров.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Вставить кабель электропитания в розетку, первоначально убедившись в том, что напряжение питания соответствует 220 V.
- Надеть шпатель 14 (А-В-С), в зависимости от необходимого режима на форсунку, расположенную в нижней части небулайзера 12.
- Влить лекарственное средство в нижнюю часть небулайзера 12 (см. инструкцию «по эксплуатации небулайзера»).
- Повернуть верхнюю часть небулайзера 11 по направлению часовой стрелки для закрытия небулайзера.
- Сверху надеть на небулайзер респираторную маску 10 или мундштук 9.
- При использовании силиконовой трубки 8, надеть на один из её концов нижнюю часть небулайзера 12.
- Другой конец силиконовой трубки 8 присоединить к штекеру соединения трубки 4, расположенному вилку на корпусе 1.
- Включить прибор, расположив выключатель 3 на символ ВКЛ.
- Для выключения расположить выключатель 3 на символ ВЫКЛ.
- Лечение должно производиться сидя, удобно располагаясь в прямом положении. При использовании респираторной маски 10 необходимо, чтобы она плотно прилегала к лицу. Дышать медленно, делая короткую паузу при завершении каждого вдоха и затем, производя быстрый вдох. Мундштук 9 при использовании должен держаться между зубами, сомкнув губы. При этом необходимо дышать громко.
- Возможно регулирование потока воздуха регулятором 13 (в виде колесика), расположенным в верхней части небулайзера 11.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Если в течение терапии необходима пауза, можно выключить небулайзер посредством выключателя 3. Лечение заканчивается, когда распылитель начинает подавать аэрозоль неостановленно.
- При завершении лечения необходимо тщательно провести чистку так, как описано в разделе «ЧИСТКА». При завершении лечения и не использования прибора вынуть вилку из сети питания.

ЧИСТКА

- Вынуть вилку из розетки. После каждого применения выполнять чистку всех используемых аксессуаров (8, 9, 10, 11, 12 и 14)
- Для очистки небулайзера прочтите раздел «ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕБУЛАЙЗЕРА».
- Очень важно: респираторная маска 10, соединительная силиконовая трубка 8, мундштук 9, части небулайзера 11 и 12 не должны помещаться в кипящую воду. Чистка может производиться при помощи специальных химических дезинфицирующих средств. В домашних условиях, возможно, промывать аксессуары в мыльном растворе и затем в проточной воде. Затем при необходимости произвести дезинфекцию.
- Дезинфицирующий агент – 3% раствор перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства. Возможен и другой способ дезинфекции аксессуаров пригодный для воздействия на полипропилен, из которого изготовлены аксессуары.
- После чистки все аксессуары необходимо тщательно просушить.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- При частом использовании прибора фильтр воздуха должен заменяться один раз в 6 месяцев.
- Для замены фильтра воздействовать на рычаг под крышкой фильтра 7. Вынуть старый фильтр и заменить его новым. Старый фильтр, возможно, очистить в мыльном растворе, затем тщательно промывать под струей проточной воды, высушить и вернуть на следующую замену.
- Вставить крышку фильтра 7 на место.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантия покрывает возможные дефекты производства или материалов в случае, если они не были выявлены пользователем или неуполномоченным персоналом.
- Датум гарантии не распространяется на: аксессуары, являющиеся предметом ввоза, к которым относится позиция 8-14 в главе «Комплектация». Ущерб, нанесенный прибору при неправильном использовании. Случайный ущерб, такой как ушибы, падения, транспортировка по причинам, не зависящим от производителя.
- В случае неисправности прибор должен отправляться в уполномоченный Центр Технического Обслуживания, прилагая к гарантийному талону чек или счет – фактуру на покупку. В другом случае, гарантия не является действительной и расходы на ремонт относятся на счет клиента.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- В случае сдачи для ремонта прибор должен сохранять неизменную конфигурацию первоначального набора. Возможные изменения внутри упаковки ставят под угрозу действенность гарантии.
- Расходы по транспортировке – за счет клиента.
- ВНИМАНИЕ!** Из гарантийных обязательств замена и возврат исключены, так как данный прибор является оборудованным индивидуальным использованием.
- ВНИМАНИЕ:** гарантия является действительной только при наличии гарантийного талона, а так же чека или счет – фактуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ НЕБУЛАЙЗЕРА	> 7 мл
РЕЖИМ РАБОТЫ	> 30 мин работы – 30 мин паузы
ВЕС ПРИБОРА	> 1.500 гр.
РАЗМЕРЫ ПРИБОРА	> 180 x 125 x 188 мм
НАПРЯЖЕНИЕ ПРИБОРА	> 220 V ~
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК	> 0,7 А
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	> 2 бар (200 Кпа)
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТОК	> 8 л/мин
ПРЕДОКАЗАТЕЛЬ	> 1,6 А/С
СКОРОСТЬ РАСТЫВАНИЯ	> 0,25 мг/мин
РАЗМЕРЫ ЧАСТЕЙ	> шпатель «А» – размер частиц до 90% составляет 5 – 10 мкм > шпатель «В» – размер частиц до 90% составляет 3 – 5 мкм > шпатель «С» – размер частиц до 90% составляет 1 – 3 мкм
МОЩНОСТЬ	> 160 Вт
ЧАСТОТА	> 50 Гц
УРОВЕНЬ ШУМА	> 50 см приблизительно 54 дБ
ИГО	> Приборы типа В > Прибор не контактирует с инъекционными жидкостями > Иглоуколатель Обработается в ультразвуковой дезинфекционной ванне
ВКЛ	> Переменный ток
ВЫКЛ	> Включен
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	> Мин: -20 °С Макс: +50 °С
УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ	> Макс: RH 94%

Условия ГАРАНТИИ действительны только при наличии инструкции с гарантийным талоном, а так же чека или счет – фактуры.

Срок гарантии – 5 лет с даты продажи.

По вопросам ремонта, обращаться непосредственно в Центр Технического Обслуживания. Адрес и телефоны ЦТО указаны в гарантийном талоне, а так же на последней странице ИНСТРУКЦИИ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕБУЛАЙЗЕРА

Сертификат Соответствия Европейский стандарт CE 0434, норма Европейского респираторного общества по европейскому EN 15444-1

Универсальный небулайзер - AndyFlow
«Универсальный» прибор, производимый аэрозоль с эффективное взаимодействие, предназначенный для профилактики и лечения заболеваний дыхательной системы. Применяемые системы А-В-С, позволяют получать аэрозоль с оптимальными размерами частиц, для того чтобы повысить эффективность доставки лекарства в органы дыхания.

Профилактика и лечение верхнего отдела дыхательного тракта – шпатель «А» – размер частиц до 90% составляет 5 – 10 мкм

Лечение трахеита - бронховидного тракта – шпатель «В» – размер частиц до 90% составляет 3 – 5 мкм

Лечение глубоко расположенных отделов дыхательного тракта – шпатель «С» – размер частиц до 90% составляет 1 – 3 мкм

Перезаправка для дозированных ингаляторов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕБУЛАЙЗЕРА

СОДЕРЖАНИЕ И ЧИСТКА

Заполните нижнюю часть небулайзера лекарством, предписанным врачом, как указано на рис. С). Важные: верхняя часть нижней части небулайзера имеет только позитивные значения.

Закройте верхнюю часть небулайзера 11 по часовой стрелке.

Присоедините нижнюю часть небулайзера 12 к соединительной силиконовой трубке 8.

Выберите аксессуары для предстоящей процедуры – респираторную маску 10 или мундштук 9.

Регулировка потока аэрозоля при помощи колесика 13.

После использования разберите небулайзер на две части, промойте их теплой водой, хорошо ополосните, прогreetте мягкой тканью и дайте просохнуть (рис. D).

Для стерилизации опустите небулайзер в кипящую стерилизующую воду. При чистке не кипятить!

Храните в сухом противомоскитном чехле и берите его в чехле солнечных лучей.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Упаковка небулайзера должна быть неповрежденной, потому что она содержит важные инструкции, которые должны быть всегда доступны.

Небулайзер имеет европейский сертификат CE 0434 9542 EN 15444-1 и классифицируется как медицинский прибор для аэроэрографии и индивидуального использования

Срок гарантии – 5 лет с даты продажи.

Срок службы: 10 лет

По вопросам ремонта, обращайтесь непосредственно в Центр Технического Обслуживания (ЦТО).

ЗАО «НИТТА - Лининг» Лицензия № 001944 от 26.05.05
ПО АДРЕСУ: 119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 37, корп. 2,
тел. +7 (495) 981-88-73,
с 10.00 до 18.00 по рабочим дням

«Эксклюзивный дистрибутор в России и странах СНГ»
ЗАО «НИТТА - Лининг»
119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 37, корп. 2,
тел. +7 (495) 981-88-73.

Произведено в Китае.